

KELVIN

ML



Kelvin mobiles
Lagerungssystem

Inspired by life


Life & Mobility

Das Kelvin mobiles Lagerungssystem – da steckt mehr dahinter

Das Sitzelement Kelvin ist schon seit längerer Zeit ein Begriff im Pflegesektor und aus Pflegeeinrichtungen nicht mehr wegzudenken. Auch für Menschen, die länger zu Hause wohnen, kann das System Kelvin eine Lösung bieten.

Das Sitzelement Kelvin hilft Menschen, die nicht mehr in einem Rollstuhl sitzen können und andernfalls bettlägerig wären. Denken Sie dabei beispielsweise an Menschen, die unter chronischen Schmerzen, ständiger Müdigkeit, erhöhter Muskelspannung oder Kontrakturbildung leiden. Mit dem Kelvin können die Nutzer mit anderen zusammen am Tisch sitzen oder draußen einen Spaziergang machen, ohne dabei auf Komfort oder die korrekte Unterstützung verzichten zu müssen.

Die Unterstützung kann mit den verschiedenen Bein-, Arm- und Kopfstützen für jeden Nutzer optimal eingestellt werden. Dazu kommt, dass die Rückseite der Stoffbasis jetzt über einen Reißverschluss verfügt, durch den die optionalen Stützkissen an der gewünschten Stelle eingesetzt werden können. Dies ermöglicht die passende individuelle Unterstützung, während der Nutzer in dem

Stuhl sitzt. Auf diese Weise kann der Therapeut direkt beobachten, wie sich dies auf die Sitzhaltung und das Verhalten seines Patienten auswirkt, und bei Bedarf die Stützkissen problemlos korrigieren.

Das Sitzelement Kelvin ist mit federndem und druckverteilendem Latexgranulat gefüllt. Dadurch kann mit den Kissen auch auf kleine Haltungsänderungen reagiert werden. Das Latexgranulat sorgt für eine optimale Konturbildung und die Unterstützung des Körpers, das Latexmaterial gibt dem Nutzer ein weiches und bequemes Gefühl.



Durch das modulare Kelvin-Sitzelement in Kombination mit der Kantelung ist es möglich, die Sitzhaltung nach Bedarf zu variieren. Dies ist vor allem für passive Benutzer ein Vorteil, die selbst nur sehr wenig oder gar nicht mehr in der Lage sind, ihre körperliche Position zu verändern. Die regelmäßige Korrektur der Sitzhaltung erhöht den Sitzkomfort und dient der Dekubitusprophylaxe.

Die Vorteile des Kelvin mobiles Lagerungssystems


Die **Sitzhöhe** des Kelvin Systems ist niedriger, sodass der Nutzer besser am Tisch sitzen kann und Transfers einfacher durchgeführt werden können.



Das Kelvin-Sitzelement verfügt über verschiedene optionale **Stützkissen**, die über eine Öffnung an der Rückseite in die flexible Basis dem Sitzelement hinzugefügt werden können. Dies ermöglicht die individuelle Anpassung der Sitzeinheit, während der Nutzer in dem Stuhl sitzt.

- a. Seitliche Unterstützung über die gesamte Länge des Rumpfes mit den langen Seitenstützkissen
- b. Lokale seitliche Unterstützung mit den kurzen Seitenstützkissen
- c. Die Kunststoff-Seitenplatte bietet zusätzliche Stabilität (immer zusammen mit a oder b verwendet)
- d. Lumbale Unterstützung mit dem Lumbalstützkissen

Das **Rückenwinkelscharnier** kann mit einem Inbusschlüssel angepasst werden, ohne dass der Reißverschluss der Tuchbasis geöffnet werden muss. Dadurch können Einstellungen einfach vorgenommen werden.

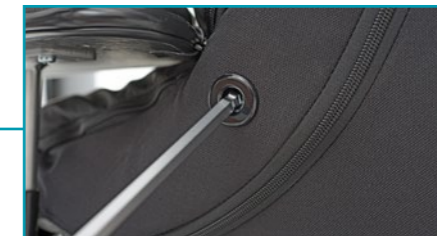

Das optionale **Keilkissen für den Gesäßbereich** kann im untersten Winkel der Tucauflage platziert werden, und bietet dem Nutzer dort eine zusätzliche Unterstützung. Das Keilkissen ist in 3 verschiedenen Breiten erhältlich.

Wählen Sie nach den Bedürfnissen des Benutzers die richtigen Kelvin-Unterstützungselemente: Kopf-, Bein- oder Armstützen. Dazu gibt es eine Auswahl an verschiedenen Sitzkissen.



Druckverteilende Latexgranulatfüllung für optimale Konturbildung und Komfort

Immer die richtige Kopfunterstützung

Standard- oder birnenförmige Sitzkissen zur seitlichen Unterstützung

Auch mit Flex-Armstützen erhältlich

Unterstützung nach Maß in sieben verschiedenen Größen

Verschiedene Sitzkissenvarianten für eine gute Druckverteilung

Variation der Sitzhaltung durch Verstellung des Sitzwinkels

Optionale Aura-Schiebehilfe

Zusätzliche Unterstützung an der Rückseite durch die optionalen Stützkissen

Verschiedenste Beinstützen zur Möglichkeit der Lagerung und Positionierung

Life & Mobility GmbH

Oderstraße 59
14513 Teltow
T +49 (0)3328 3381300
F +49 (0)3328 3381301

www.life-mobility.com
info.de@life-mobility.com

Hauptsitz

Life & Mobility B.V.
Logistiekweg 7
NL- 7007 CJ Doetinchem
T +31 (0)314 328 000

