



Reinigung und Desinfektion von Rollstühlen



ROXX



CANTO



ROLLIT



AXI2GO

Begriffe:

Reinigung

- Das mit einer Seifenlauge (oder mit Mikrofaser) mechanische Entfernen sichtbaren Schmutzes (Eiweiße, Fette) und damit der vorhandenen Mikroorganismen.

Desinfektion

- Irreversible Inaktivierung von Mikroorganismen (chemisch/thermisch)
- Auf die Minimierung des Übertragungsrisikos von Mikroorganismen abzielend

Oberflächenhygiene

Aufgrund des Einsatzes der Rollstühle (CantoNxt, Roxx, Axi2go, Rollit) gehen wir in diesem Reinigungs- und Desinfektionsprotokoll von Folgendem aus:

- Hilfsmittel mit möglichem Infektionsrisiko: Materialien, die mit nicht intakter Haut in Kontakt kommen können
- Unbedenkliche Hilfsmittel: kleines Risiko, kommen mit intakter Haut in Kontakt

Reinigung und Desinfektion richten sich auf:

- Skai- und Spanngummibezug des Sitzes und der Rückenlehne
- Skai-, Spanngummi- oder Polyurethan-Armlehnen, Wadenplatten und Kopfstützen
- Kunststoff-Fußrasten
- Metallrahmen

Hilfsmittel reinigen oder desinfizieren

Optisch sauber / leichte Verschmutzung: Reinigung

- Reinigen Sie das Hilfsmittel mit einem Tuch, Wasser und einem Mikrofaser- oder Scheuerschwamm (kein Scheuerschwamm) oder mit einem der empfohlenen Pflügetücher.
- Die Reinigung in einer Waschmaschine oder einer Rollstuhl-Reinigungsstation ist bei Temperaturen zwischen 80 °C und 90 °C zulässig.

Starke Verschmutzungen: Reinigung und Desinfektion

- Zunächst das Hilfsmittel reinigen und anschließend das Hilfsmittel mit einem der empfohlenen Mittel desinfizieren.

BRMO (Besonders resistente Mikroorganismen): Reinigung und Desinfektion

- Falls das Hilfsmittel optisch sauber ist, kann die Reinigung und Desinfektion auf einmal mit einem der empfohlenen Feuchtigkeitstücher oder Schaumreiniger durchgeführt werden.

Goldene Regeln der Desinfektion:

1. Verwenden Sie für den Erhalt unserer Produkte eines der empfohlenen Mittel
2. Halten Sie sich an die Anweisungen der Desinfektionsmittel
3. Desinfektion durch Fachleute/geschultes Personal
4. Bei sichtbarem Schmutz (Blut, Schleim, Urin usw.) immer erst entsprechend der oben stehenden Anweisung reinigen

Welche Reinigungs- und Desinfektionsmittel kann ich verwenden?

Für die Reinigung bzw. die Desinfektion der Rollstühle (CantoNxt, Roxx, Axi2Go, Rollit) empfehlen wir eines der folgenden Mittel:

- Hartman Bacillol 30 Feuchtigkeitstücher & Schaum Spray
- Aseptix Desinfektionstücher (SteriMax)
- Ecolab Oxy Wipes Desinfektionstücher & Incidin OxyFoam Schaum Spray

Diese Hilfsmittel verfügen über nachgewiesene Effektivität bei der Bekämpfung von Bakterien/Schimmelpilzen/Viren.