



# iFlow Care - Benutzeranleitung

**iFLOW**

Scannen Sie den QR-Code am Lenker für eine ausführliche Anleitung.


## System aktivieren

- Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**, um das System einzuschalten. Der Bildschirm wird jetzt aktiviert.



## System aktivieren

- **Drücken Sie den Aktivierungshebel** gegen den Lenker, um die Unterstützung zu aktivieren.

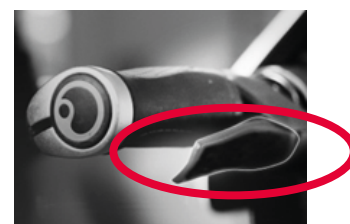

## Unterstütztes Fahren

- Halten Sie den Hebel gedrückt und **schieben Sie sanft gegen den Lenker**.
- Die iFlow Care unterstützt Sie nun beim Schieben, Lenken und Bremsen.



## Unterstütztes Fahren

- **Wichtig: Bevor Sie den Hebel loslassen, halten Sie zuerst an.** Sobald der Hebel losgelassen wird, endet die Unterstützung sofort.



## Manövriermodus

- **Drücken Sie die M-Taste**, um den **Manövriermodus zu aktivieren**. Auf dem Bildschirm erscheint ein ‚M‘. In diesem Modus können Sie den Rollstuhl manuell steuern, zum Beispiel um präzise an einen Tisch heranzufahren.
- Drücken Sie erneut die M-Taste, um die Unterstützung wieder zu aktivieren.

