



# Tracix

QUICK START





De Tracix rugleuning biedt een hoge mate van **zijwaartse ondersteuning** en **contourvolgendheid**, waarmee toch de juiste **individuele ondersteuning** geboden kan worden.

Een rugleuning bedoeld voor gebruikers met **kyfotische deformiteiten** van de wervelkolom of een **kyfotische zithouding**, in combinatie met een beperkte rompbalans.



Gebruik de Tracix rugleuning altijd in combinatie met:

**a. Hoofdsteunbeugel met extra schakel**  
(van toepassing op alle rolstoelen)



**b. Verbindingsbuis-verdiepsetje**  
(alleen op Canto Nxt)



**Acht tips** voor een optimale instelling van de Tracix rugleuning:

1. Verwijder de zijkanten & armleggers
2. Plaats de rugleuning in de stoel en zet alle spanbanden los
3. Klap de zijwangen met de hendels naar buiten (fig. 1)
4. Positioneer de rugleuning met de inbusverstelling op de juiste hoogte (fig. 2)
5. Stel de spanbanden passend in: optimum tussen contourvolgen & ondersteunen
6. Positioneer de wangen met de 2 inbusbouten op de juiste hoogte (fig. 3)
7. Stel de wangbreedte in
8. Plaats de zijkanten & armleggers terug en monteer hierbij zonodig de armleggers naar buiten

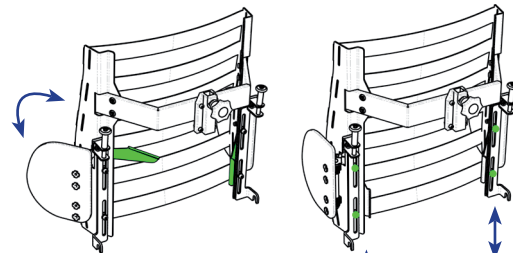


fig. 1

fig. 2

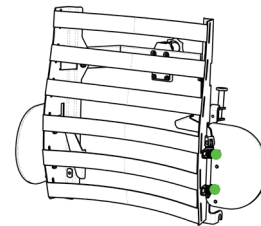


fig. 3



12/2014 - 132722AE

P.O. Box 304, NL - 7000 AH Doetinchem Logistiekweg 7, Doetinchem - The Netherlands

T +31 (0)314-328 000 F +31 (0)314-328 001 E [info@life-mobility.com](mailto:info@life-mobility.com) I [www.life-mobility.com](http://www.life-mobility.com)

