

Zithoogte aanpak (geschikt voor zelfrijder en duwwagen)

CANTO next

NEWTON

Werkwijze

Stap 1:

Bepaal het configuratie-nummer a.d.h.v. de zithoogte, type zitkussen en zittinghoek. Het configuratie-nummer correspondeert met een regel in de zithoogtetabel.

Stap 2:

Kies de juiste tabel op basis van de voorwiel maat (6 inch of 8 inch).

Stap 3:

Kies de juiste regel aan de hand van het configuratie-nummer en maat achterwiel.

Gemeten volgens onderstaande afbeeldingen, gemeten met zitdiepte D48, zwenkwielen georiënteerd in de rijrichting.

Voorbeeld

Canto nextframe: 6 inch/22 inch

Stap 1:


Zithoogte 52, Contour Deep, zithoek A
=> Configuratie-nummer = 4

Stap 2: 6 inch

=> Blauwe tabel

Stap 3: 22 inch

=> 2 gaten zichtbaar / 4e en 5e gat van boven

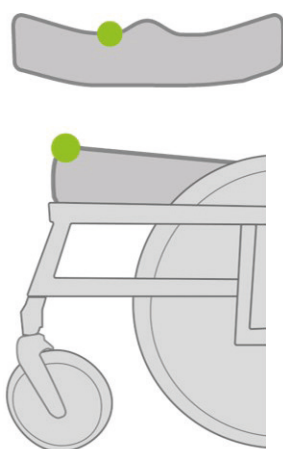

Zit-hoogte	Contour			Contour Deep/Xtra		
	A	B	C	A	B	C
42-44	1	1	x	1	x	x
45-46	2	2	1	2	1	x
47-49	3	2	2	2	2	1
50-51	4	3	3	3	3	2
52-54	5	4	4	4	4	3
55-57	6	5	5	6	5	4
58-59	7	6	6	7	6	5
60-62	x	7	7	x	7	6

Zit-hoogte	Seat base		
	A	B	C
39-41	1	1	x
42-44	2	2	1
45-46	3	3	2
47-49	4	4	3
50-51	5	5	4
52-54	6	6	5
55-57	7	7	6
58-59	x	x	7
60-62	x	x	x

Let op:

Configuratienummers 1 tot en met 7 zijn geschikt voor Canto Nxt zelfrijder.

Configuratienummers 1, 3, 5 en 7 zijn geschikt voor Canto Nxt duwwagen.

Configuratie nummer	Maat achterwiel	Voorwiel maat: 6 inch				
		Type telescoop	Gatpositie voorwiel	Gasveerpositie*	Gatpositie standaard achterwiel	Gatpositie achterwiel iFlow
1	12,5"	Trippel	Geen gat zichtbaar	Achter	Bovenste	Hoogste
	20"	Trippel	Geen gat zichtbaar	Achter	Bovenste	Hoogste
2	20"	Standaard	Geen gat zichtbaar	Midden	Bovenste	Hoogste
3	12,5"	Standaard	1 gat zichtbaar	Midden	Bovenste	Hoogste
	22"	Standaard	1 gat zichtbaar	Midden	Bovenste	Middelste
4	22"	Standaard	2 gaten zichtbaar	Midden	Middelste	Middelste
5	12,5"	Verlengd	Geen gat zichtbaar	Midden	Middelste	Middelste
	24"	Verlengd	Geen gat zichtbaar	Midden	Middelste	Middelste
6	24"	Verlengd	1 gat zichtbaar	Midden	Onderste	Laagste

Configuratie nummer	Maat achterwiel	Voorwiel maat: 8 inch				
		Type telescoop	Gatpositie voorwiel	Gasveerpositie*	Gatpositie standaard achterwiel	Gatpositie achterwiel iFlow
3	12,5"	Trippel	1 gat zichtbaar	Midden	Bovenste	Hoogste
	22"	Trippel	1 gat zichtbaar	Midden	Bovenste	Middelste
4	22"	Standaard	Geen gat zichtbaar	Midden	Middelste	Middelste
5	12,5"	Standaard	1 gat zichtbaar	Midden	Middelste	Middelste
	24"	Standaard	1 gat zichtbaar	Midden	Middelste	Middelste
6	24"	Standaard	2 gaten zichtbaar	Midden	Onderste	Laagste
7	12,5"	Verlengd	Geen gat zichtbaar	Midden	Onderste	Laagste
	26"	Verlengd	Geen gat zichtbaar	Midden	Onderste	Laagste

* Gasveerpositie voor een zithoekverkanteling van 0 - 30 graden