

# Antikiep

## Veilig en doordacht



Sinds maandag 25 augustus 2014 worden alle Roxx - The NEW Original en Canto Nxt stoelen uitgevoerd met een nieuwe antikiepsteun:

- Integratie antikiep & trapdop
- Herkenbare werking van de antikiep
- Gelijke antikiepveiligheid bieden als met huidige antikiep



ROXX




CANTO Nxt


### Productoplossing: nieuwe antikiep

De nieuwe antikiep bestaat uit een antikiep opnamedeel dat achterin de framebuis van de rolstoel wordt gemonteerd.

In het opnamedeel wordt een insteekbuis met 2 stootwieltjes, uitgevoerd in 2 lengtevarianten, geschoven.

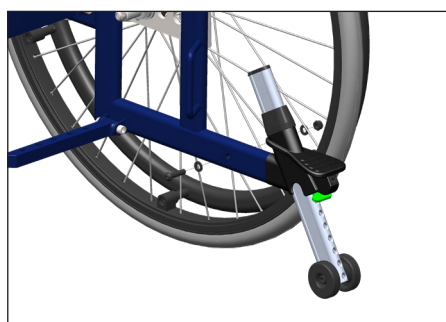

Met het groene bedieningshendeltje kan de insteekbuis op de gewenste hoogte ingesteld worden: voor buitenshuis rijden met obstakels wat hoger,

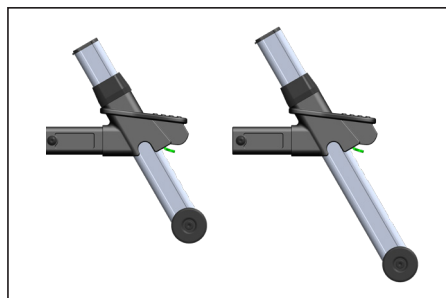

voor binnenshuis wat lager of volledig ingeschoven.

De insteekbuis is voorzien van een zgn. hoogte-indicator die bij het volledig inschuiven van de antikiep, aangeeft wat de vorige stand van de antikiep was.

Voor gebruikers waarbij een nog hogere preventieve antikiepveiligheid gewenst is, kan een Xtra safe adapter in de framebuis gemonteerd worden. Hiermee kan de antikiepsteun 9 cm verder naar achteren op de rolstoel gemonteerd worden. Deze adapter wordt geleverd bij gebruikers die gebruik maken van de amputatie-asplaat en kan optioneel gekozen worden voor bv. extreem onrustige gebruikers.



### Waarom antikiep?

De antikiepsteun - mits goed ingesteld - beschermt de gebruiker in de rolstoel tegen het achterover kiepen van de rolstoel. De kans op het achterover vallen met de rolstoel wordt onder andere beïnvloed door:

- de ligging van het zwaartepunt van de gebruiker in de rolstoel (dit wordt mede bepaald door asgatpositie, rughoek, zittinghoek, zithoekverkanteling en gewichtsverdeling over het lichaam (bijv. amputaties)).
- de eventuele onrust of spasmes van de gebruiker.
- de helling waarop je rijdt.

Bij de configuratie van onze rolstoelen wordt de kans op het achterover vallen van de rolstoel al tot een minimum gereduceerd, zo kiezen we er vanuit het oogpunt van preventieve veiligheid bijvoorbeeld voor om de Canto Nxt standaard uit te voeren met antikiepsteunen.

### Online

De nieuwe antikiep is online te vinden op het onderdelenboek en in de spare-partslijst. Achter de dealerlogin is een digitale montage-instructie achter de dealerlogin voor montage van de nieuwe antikiep op een bestaande Roxx en Canto Nxt.

