


iFlow Care - gebruikersuitleg


iFLOW CARE

Systeem activeren

- Druk op de **aan/uit-knop** om het systeem in te schakelen. Het scherm gaat nu aan.

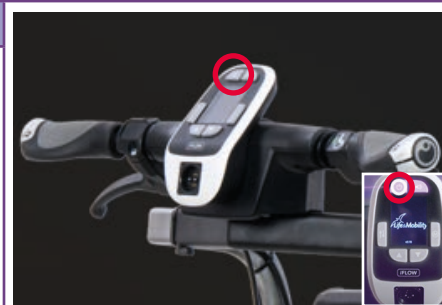


- Knijp de activeringshendel in** door deze tegen het stuur te drukken. Hiermee activeer je de ondersteuning.

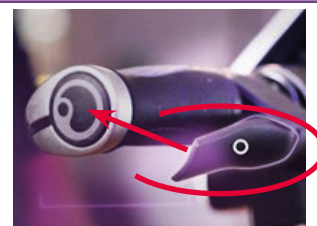


Ondersteund rijden

- Terwijl je de hendel ingeknepen houdt, **duw zachtjes tegen het stuur**. De iFlow Care zal nu ondersteunen bij het **duwen, sturen en remmen**.
- Belangrijk:** stop eerst met lopen voordat je de hendel loslaat. Zo remt de stoel rustig af.

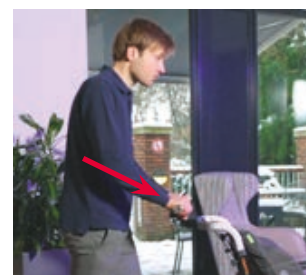


Manoeuvreeerstand

- Druk op de **M-knop** om de **manoeuvreeerstand in te schakelen**. Er verschijnt een 'M' op het scherm. In deze stand kun je de rolstoel handmatig bedienen, bijvoorbeeld om nauwkeurig aan te schuiven aan tafel.
- Druk nogmaals op de M-knop om de ondersteuning weer in te schakelen.

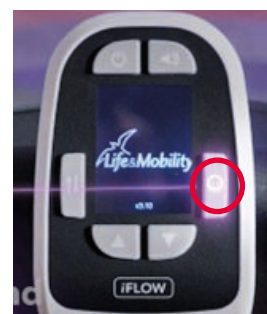

Manoeuvreren in de vrijloopstand

- Bedien de vrijloophendels om een iFlow systeem met een elektrische parkeerrem in de vrijloopstand te zetten.

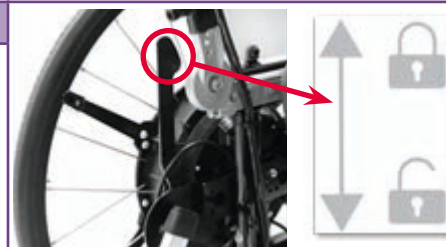

Parkeren

Voorkom onbedoeld rijden en wegrollen: parkeer het iFlow systeem.

- Zonder elektrische rem: bedien de bandrem of voetrem.
- Met elektrische rem: beëindig de manoeuvreeerstand of vrijloopstand.



Scan de QR-code of die op het stuur voor een uitgebreide uitleg.