
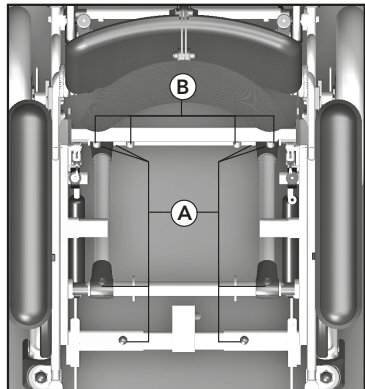


Canto Nxt frame-instellingen

Voor de Kelvin zitkuip op het Canto Nxt onderstel geplaatst kan worden, wordt eerst het Canto Nxt frame juist ingesteld. (zie stap 1 tm 5). Deze Canto Nxt frame-instellingen zijn afhankelijk van de Kelvin kuipmaat. Let op: Gebruik voor de opbouw van de Kelvin op het Canto Nxt frame altijd de lange rugbuizen van de Canto Nxt (lengte 37,5 cm): art.nr 80074 Standaard rugbuis links lang Midnight blue compleet art.nr 80075 Standaard rugbuis rechts lang Midnight blue compleet Voor het monteren van de Kelvin zitkuip op de Canto Nxt is de 'Montageset Kelvin zitelement t.b.v. Canto Nxt' nodig. De inhoud hiervan is: 1 - Bevestigingsset rugbuis L + R bestaat uit: - rugopname met stauff-blok L + R - rugbuisjes met stauffblokken (2x) 2 - Bevestigingsset onderzijde kuip bestaat uit: - vulplaatje zwart - stauff-blok - montageplaatje met schroefdraad	 Bevestigingsset rugbuis L + R  Bevestigingsset onderzijde kuip						
Stap 1 Stel het Canto Nxt frame in op de juiste zitbreedte. <table><tr><td>Kelvin kuip</td><td>Canto Nxt instelling</td></tr><tr><td>S40/48 - M40/48/56</td><td>ZB 42 cm</td></tr><tr><td>L48/56</td><td>ZB 47 cm</td></tr></table>	Kelvin kuip	Canto Nxt instelling	S40/48 - M40/48/56	ZB 42 cm	L48/56	ZB 47 cm	• Verwijder de 8 inbusbouten (A). • Draai de 4 inbusbouten (B) een paar slagen los. • Stel de gewenste zitbreedte symmetrisch in. • Zet alle inbusbouten weer vast 
Kelvin kuip	Canto Nxt instelling						
S40/48 - M40/48/56	ZB 42 cm						
L48/56	ZB 47 cm						
Stap 2 Stel het Canto Nxt frame in op de juiste zitdiepte. Dit is zitdiepte 52 cm voor alle maten Kelvin zitkuip (dit is het 7e indicatiestreepje). Let op: dit is een voorinstelling, deze kan tijdens de fijn-afstelling (stap 10) nog iets gewijzigd moeten worden.	Het rugframe is schuifbaar gemonteerd in de zijdelen van het zitframe. Door het rugframe naar voren of naar achteren te schuiven kan de zitdiepte traploos worden ingesteld. • Draai de inbusbouten los (A). • Schuif het rugframe in of uit tot de gewenste zitdiepte is bereikt. • Bepaal de exacte maat met behulp van de maatstreepjes op beide zijden van het rugframe. 						

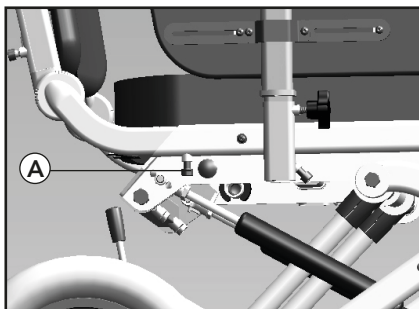

Stap 3

Stel het Canto Nxt frame in op de juiste zithoogte.

Gewenste zithoogte

51 cm

56 cm

Bandenmaat

200 x 42 x 12,5"

200 x 42 x 12,5"

Asgat-positie


A1

A2

Voorwiel-telescoop

T1-B

T2-B

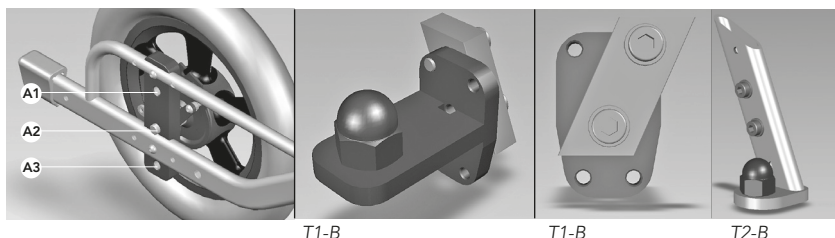


Stap 4

Stel het kartelscharnier van de rugbuizen af op de 2^{de} streep van onderen.



- Draai de inbusbouten (A) los in de rugscharnierpunten.
- Verander de rughoek.
- Draai vervolgens de inbusbouten weer vast.

Let op: controleer met behulp van het "maatstreepje" of de linker en rechter duwstang dezelfde hoek hebben.

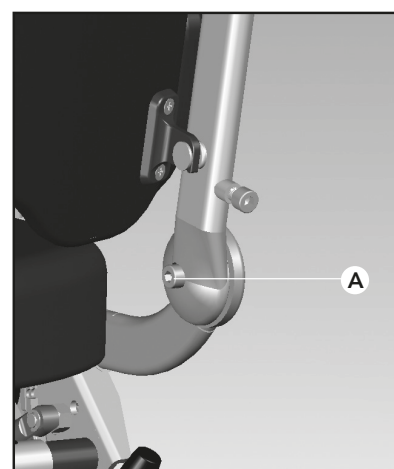

Stap 5

Stel de rugbuizen van de Canto Nxt af op de juiste hoogtepositie, waarbij het hoogte-fixatieboutje zich in het 3^{de} gaatje van onder bevindt.

Let op: dit is een voorinstelling, deze kan tijdens de fijn-afstelling nog iets gewijzigd moeten worden.

- Draai het inbusboutje die in het bovenste deel van het rughoekscharnier zit, los van het vierkantmoertje.
- Positioneer de rugbuis op de juiste hoogte en plaats het inbusboutje in het 3^e gaatje van onder.
- Draai de vierkantmoer weer vast.



Gebruik voor de opbouw van de Kelvin op het Canto Nxt frame altijd de lange rugbuizen van de Canto Nxt (lengte 37,5 cm):

art.nr 80074 Standaard rugbuis links
lang Midnight blue
compleet

art.nr 80075 Standaard rugbuis rechts
lang Midnight blue
compleet



Kelvin kuip instellingen

Voor de Kelvin zitkuip op het Canto Nxt onderstel geplaatst kan worden (stap 8 t/m 11), wordt eerst het Canto Nxt frame juist ingesteld (zie stap 1 t/m 5) en wordt de Kelvin kuip juist ingesteld (stap 6 en 7).

Stap 6

Stel de rughoek van de Kelvin kuip in volgens de standaard af-fabriek instelling.

Voor het instellen van de rughoek van de Kelvin kuip kun je gebruik maken van de opening in het canvas en/of de rits van het canvas een stukje openen t.h.v. van de rughoekscharnieren, om met een inbussleutel maat 8 het tandscharnier los en vast te draaien.



Let op! In mei 2022 is er een wijziging geweest in de rughoekinstelling van de Kelvin kuip. Kijk op het labeltje achterop de Kelvin uit welke periode de Kelvin komt.



Kuip van voor mei 2022:



Kuip van na 2022, te herkennen aan de witte stip op het scharnier:




Stap 7

Check de armleggeropname

verbredingsblokje armleggeropname
en 2x M6x35
art.nr.: 88479

Check of de armleggeropname van de Kelvin voorzien is van het verbredingsblokje van 20 mm en met de lasmoer naar boven.

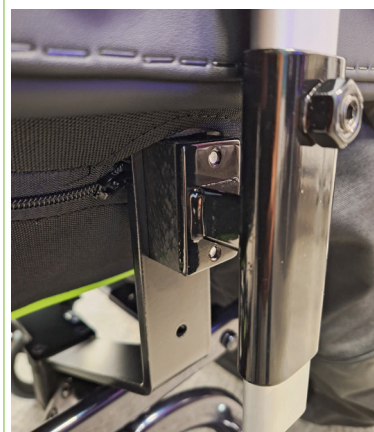

Kelvin montage op Canto Nxt frame

Stap 8

Plaats de rugopname

Plaats de rugopname van de Kelvin kuip met het stauff-blok om de nokken van de rugbuizen, waarbij het buisje van de rugopname altijd naar voren en naar binnen wijst. Let hierbij op dat de nok van de rugbuis altijd binnen het stauff-blok valt en hier niet buiten uitsteekt.





Stap 9 Plaats de Kelvin kuip op het Canto Nxt frame	Plaats de onderste beugel van de Kelvin kuip met de 2 stauff-blokken, het vulplaatje en het metalen montageplaatje op de ronde framebuis van het Canto Nxt frame. (Tip: Hierbij kan het handig zijn om het bovenste stauff-blok deel even aan de Kelvin beugel te tapen). Plaats het rugbuisje in de rugopname die in stap 8 op de rugbuizen gemonteerd is.	
Stap 10 Zorg dat de Kelvin kuip in de juiste hoek gepositioneerd is op het Canto Nxt frame.  Let op: dit is de definitieve fijnafstelling, waarbij het kan dat de zitdiepte van de Canto Nxt (stap 2) en de rugbuis hoogte (stap 5) nog een fijnafstelling vragen om de juiste hoek te realiseren	1 Plaats het Canto Nxt frame in de voorste zithoekverkantelpositie 2 Plaats een waterpas op het verticale deel van de onderbeugel van de Kelvin kuip 3 Positioneer de kuip horizontaal of iets achterover met behulp van de rugbuisjes in de rugopname op de rugbuizen. Zonodig kan de zitdiepte en rugbuis hoogte ook nog bijgesteld worden om deze positie te realiseren 	
Stap 11 Check van de zitondersteuning van de Kelvin het volgende: - De volgende Kelvin ondersteuningskussens zijn af-fabriek altijd voorzien van de volgende vulzakjes: - Beide Rug - zijkussens hebben in alle 3 de compartimenten een klein vulzakje (10 cm) - Rugkussens 6 en 7 en de beide dijbeenkussens van het zitkussen zijn allemaal voorzien van een groot vulzakje (30 cm) - Het zitkussen van de Kelvin kan op twee diepteposities geplaatst worden in de kuip, op de voorste of achterste klittenbandstrook. Als het zitkussen in de voorste (en diepste) zitdieptepositie wordt gemonteerd (bij een 40 kuip ZD 44-48 cm, een 48 kuip ZD 52-56 cm, een 56 kuip ZD 60-64 cm), dan wordt er altijd een rughoek-zitdiepte opvulkussen achter het zitkussen geplaatst. - De voetplaat van de CBO beenondersteuning is altijd standaard met de voetplaat aan de bovenkant van het scharnier gemonteerd (zie foto), voor langere onderbeenlengtes kan deze eventueel omgedraaid worden.		