

Reiniging en desinfectie rolstoelen



ROXX



CANTO



ROLLIT



AXI2GO

Begrippen:

Reiniging

- Het met een zeepoplossing (of met microvezel) mechanisch verwijderen van zichtbaar vuil (eiwitten, vetten) en daarmee de aanwezige micro-organismen.

Desinfectie

- Irreversible inactivering van micro-organismen (chemisch/thermisch)
- Gericht op minimaliseren van risico op overdracht van micro-organismen

Oppervlakte hygiëne

Vanwege de toepasbaarheid van de rolstoelen (CantoNxt, Roxx, Axi2go, Rollit) gaan we in dit reinigings- en desinfectieprotocol uit van:

- Semi-kritische hulpmiddelen: matig risico, materialen die in contact kunnen komen met niet intacte huid.
- Niet kritische hulpmiddelen: klein risico, komen in contact met de intacte huid.

Reiniging en desinfectie richten zich op:

- Skai en Stretchrubber bekleding van de zitting en rugleuning
- Skai, stretchrubber of polyurethaan armleggers, kuitplaten en hoofdsteunen
- Kunststof voetplaten
- Metalen frame

Hulpmiddelen reinigen of desinfecteren

Optisch schoon / lichte vervuiling: Reinigen

- Reinig het hulpmiddel met een doek, water en een microvezel doek (geen schuurspons) of met één van de aanbevolen wipes.
- Reiniging in een wasmachine of een reinigingsstation voor rolstoelen is toegestaan bij temperaturen tussen 80 °C en 90 °C.

Sterke vervuiling: Reinigen en desinfecteren

- Eerst het hulpmiddel reinigen en vervolgens het hulpmiddel desinfecteren met één van de aanbevolen middelen.

BRMO: Reinigen en desinfecteren

- Indien hulpmiddel visueel schoon is kan het reinigen en desinfecteren in één handeling plaatsvinden met de aanbevolen wipes of foam.

Gouden regels desinfectie:

1. Gebruik voor het behoud van onze producten een van de aanbevolen middelen
2. Houd je aan de instructies van de desinfectiemiddelen
3. Desinfectie door deskundig/geschoold personeel
4. Bij zichtbaar vuil (bloed, slijm, urine etc.) altijd eerst reinigen volgens bovenstaande instructie

Welke reinigings- en desinfectiemiddelen kan ik gebruiken?

Voor het reinigen of desinfectiemiddelen van de rolstoelen (CantoNxt, Roxx, Axi2Go, Rollit) adviseren wij één van de volgende middelen:

- Hartman Bacillol 30 wipes & foam
- Aseptix desinfection doekjes (SteriMax)
- Ecolab Oxy Wipes & Incidin Oxy foam

Deze middelen hebben een aangetoonde effectiviteit bij de bestrijding van bacteriën/schimmels/virussen.

Tevens voldoen deze middelen aan de in Nederland gestelde wettelijke eisen omtrent reiniging- en desinfectie en beschikken over een N-nummer (goedgekeurd door College Toelatingen Gewasbeschermingsmiddelen (CTGb)).